

INSTRUCTIEKAART

Benjamin ComfyNest

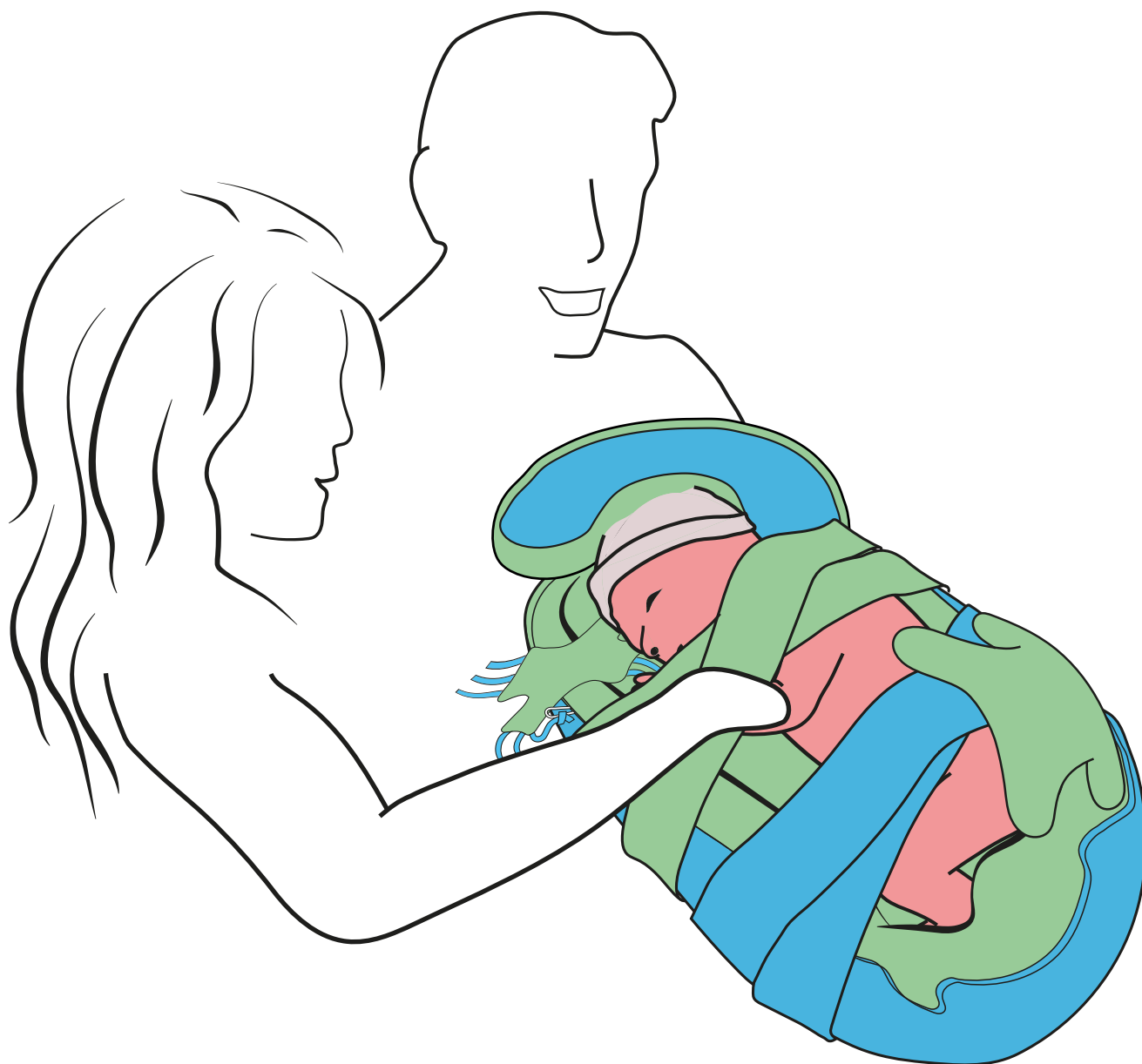



- gebruik de juiste maat nest, zie gebruikershandleiding
- let op temperatuurschommelingen
- niet gebruiken in bed
- gebruik altijd onder monitorbewaking

ComfyNest

Positionering ComfyNest



- hoofd neutrale positie ten opzichte van romp in middellijn oriëntatie
- armen/benen in flexiehoouding
- voetjes tegen zij- of onder rand
- mond- hand contact
- voorkom W houding armen/benen

Gebruik banden

- begrenst ongecontroleerde bewegingen
- zo nodig gebruiken
- niet te strak en niet knopen
- nooit over hals en hoofd


Zijligging

- begrenst ongecontroleerde bewegingen
- zo nodig gebruiken
- niet te strak en niet knopen
- nooit over hals en hoofd

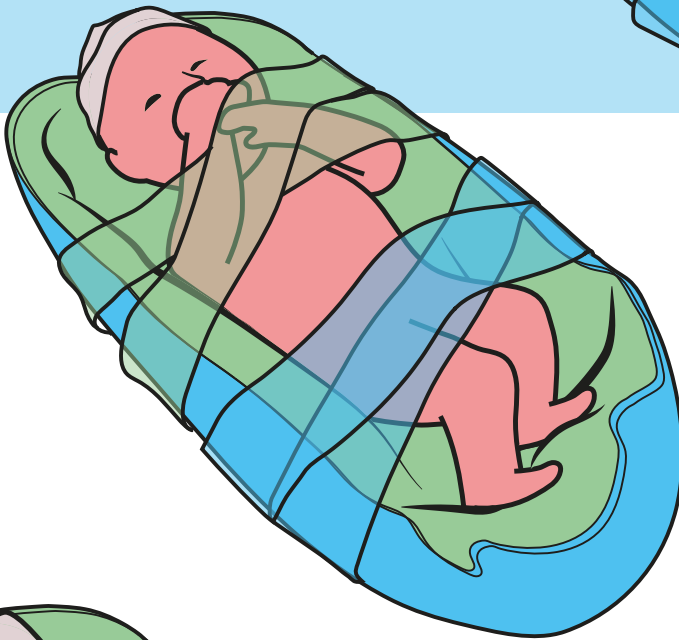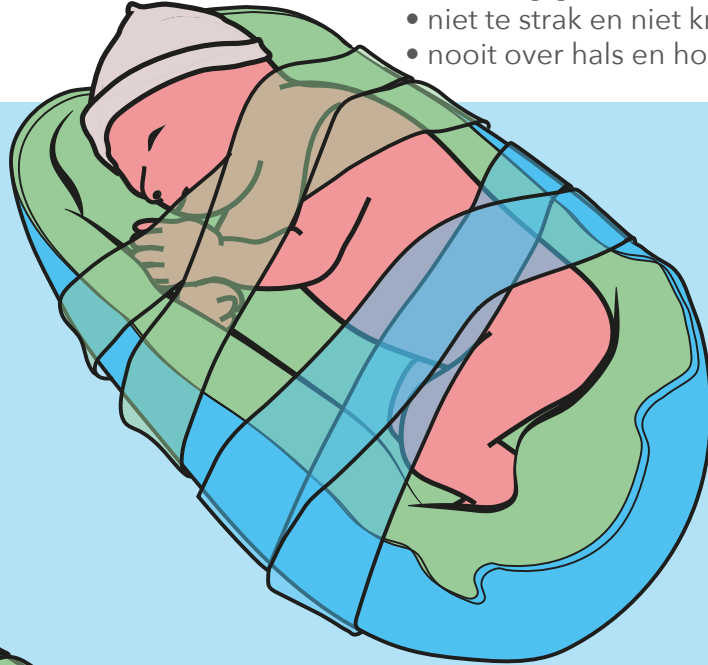

Rugligging

- rand nest begrenst stevig
- extra steun hoofd met ComfyPillow
- schouders licht gerond
- heupen licht gebogen

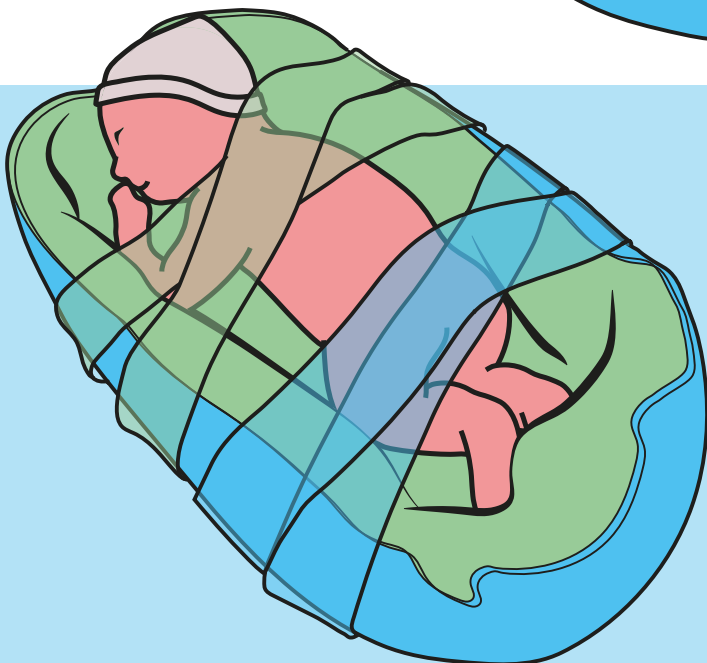

Buikligging

- gebruik buikrol (niet lager dan navelhoogte en niet breder dan romp)
- schouders licht gebogen en gesteund
- benen opgetrokken
- rand nest moet begrenzen

