


ANLEITUNGSKARTE

Benjamin Boundy

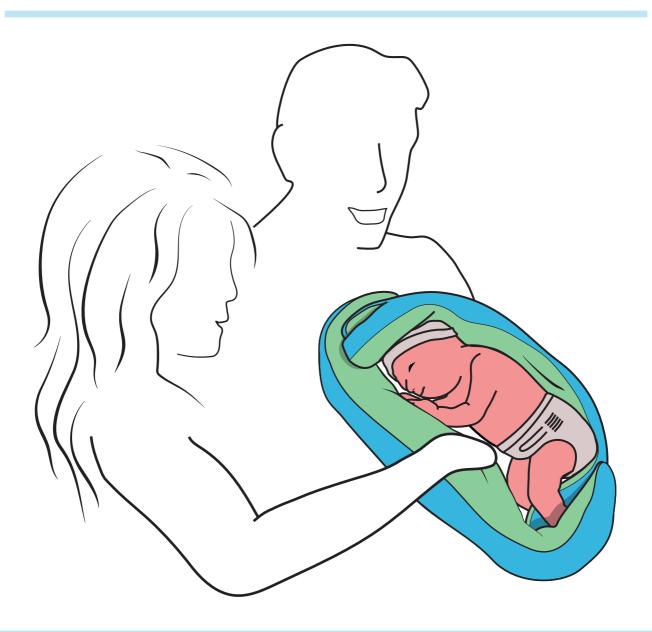

Benjamin Care Utrechtseweg 317 3732 GA De Bilt www.benjamincare.nl info@benjamincare



- Immer unter Monitorüberwachung verwenden
- Verwenden Sie den Boundy für Babys in der empfohlenen Gewichtsklasse 2.500 5.000 g
- Auf Temperaturschwankungen achten, insbesondere bei Babys, denen gefäßerweiternde Wirkstoffe (z.B. Prostaglandine) verabreicht werden
- Nicht auf Brust, Bauch oder Gesicht legen, da dies die Atmung behindern kann
- Verwenden Sie die Enden nur kurz auf einem Körperteil

Lagerung mit dem Boundy Bauchlage • Kopf in neutrale Position zum in • Verwenden Sie 2 Benjamin Boundys ComfyBelly verwenden (nicht niedriger als Mittellinie ausgerichteten Rumpf • Arme/Beine in Flexionshaltung Nabelhöhe und nicht breiter als Rumpf). • Mund-Hand-Kontakt Schultern leicht gebeugt und gestützt • Füße gegen Seite oder unteren Rand Beine angezogen Rand des Boundys soll begrenzen • W-Haltung Arme/Beine vermeiden Seitliche • Der Rücken des Babys wird am Rande von Boundy gestützt • Legen Sie den Unterarm nach vorne Mund-Hand-Kontakt



